

**PATENT
PENDING**

**BREVET EN
INSTANCE**

*Voir Le Verso Pour Les
Instructions D'utilisation*

*See Reverse For
Instructions
On Use*



WrapAway[®]

The Ultimate Tool To
Remove Wraps Without
Getting Hurt!

L'ultime Outil Pour Retirer
Les Pansements Sans Se
Blesser!



À VÉRIFIER
www.WrapAway.pro
CHECK IT OUT

Extension pole sold separately | Rallonge vendue séparément

DID YOU KNOW?

Hoof-fit Gel is a proven treatment for *Digital Dermatitis* (Hoof warts). Wrapping a cow's foot is a great way to ensure that the Hoof-fit Gel stays on a little longer. It is also important to remove the wrap in a timely manner (after 3-4 days).

LE SAVIEZ-VOUS?

Hoof-Fit Gel est un traitement éprouvé contre la *dermatite digitale* (verrues de sabot). Faire un pansement sur la patte de la vache permet de conserver un peu plus longtemps le Hoof-Fit Gel en contact avec la peau de l'animal. Il est également important de retirer le bandage au bon moment (3-4 jours).



Apply Hoof-fit Gel to affected hoof

Appliquez le Hoof-Fit Gel sur le sabot affecté



Wrap with Intra tape

Faire le pansement avec le Intra tape



Remove the wrap after 3-4 days using the WrapAway tool

Retirez le pansement après 3-4 jours en utilisant le WrapAway



1 800 617 8908
www.WrapAway.pro

WARNING: This tool is designed for livestock use only. Keep away from children. The cutting blade is very sharp and should be handled with caution. Improper use can result in injury. Diamond Hoof Care Ltd., the manufacturer, and our distributors are not liable for improper use of the WrapAway tool.

Avertissement: Cet outil est conçu pour être utilisé uniquement sur le bétail. Gardez hors de la portée des enfants. La lame est très affûtée et doit être manipulée avec prudence. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures. Diamond Hoof Care Itée, le fabricant et les distributeurs ne sont pas responsables d'une utilisation incorrecte du WrapAway.